

Ортодонтия

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ

После того, как брекеты, поставленные в ходе ортодонтического лечения, будут сняты:

- тщательно зачистите остаточный цемент
- нанесите DENTIN DESENSITIZER с помощью щетки, и повторите эту процедуру три раза

Поскольку во время такого лечения чувствительность зубов ЧАСТО повышается

- нанесите DENTIN DESENSITIZER с помощью щетки, и повторите эту процедуру три раза

DENTIN DESENSITIZER

Является жидким гелем, произведенным из инновационного синтезированного с соблюдением медицинской степени чистоты кристаллического гидроксиапатита, разработанного компанией GHIMAS; отличается размерами кристаллов от 70 до 100 нанометров. Снижает ли он восприимчивость зубов?

- Лишь отчасти
- Обладает высокой резистентностью к разъеданию кислотами в ротовой полости при применении в виде суспензии с 30% содержанием спирта

Указания

- Для лечения повышенной чувствительности, включая корни, венчики, эрозию эмали, ранки из-за брекетов
- Для лечения повышенной чувствительности, возникшей после отбеливания
- Для снижения чувствительности и профилактического лечения здоровых, живых зубных опор, функция которых будет восстановлена с помощью фиксированных протезов.

Si ringrazia per la collaborazione
il Prof. Giovanni Doici
il Prof. Enrico Gherlone
il Prof. Roberto Giardino
il Prof. Andrea Pilloni
la Prof.ssa Lia Rimondini
il Prof. Fernando Zarone

GHIMAS
Via Cimarosa, 85
40033 Casalecchio di Reno (BO) Italia
Tel. ++ 39 051 575353 - Fax: ++ 39 051 575668
E-Mail: info@ghimas.it
www.ghimas.it

DENTIN

I.P.
CE 0434

DESENSITIZER

СНИЖАЕТ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
К ГОРЯЧЕМУ И ХОЛОДНОМУ



ПОВЫШЕННАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДЕНТИНА

Понижение чувствительности, начиная с первой недели



DENTIN DESENSITIZER

Начиная с **первой недели**, можно наблюдать значительную разницу между группами; и это различие продолжает увеличиваться в последующие недели

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДЕНТИНА



СОКРАЩЕНИЕ- 90%
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ – 75%

Сокращение интенсивности дентинных болей
90% пациентов
Исчезновение дентинной гиперчувствительности
85% пациентов

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ



- 70% после 1-ого применения
- 80% после 2-ого применения

Клинические результаты испытаний DENTIN DESENSITIZER на живых опорах для протезов показывают, что он снижает чувствительность от 70% при 1-м применении до 80% при повторном применении.



Радиограмма двух живых опор для протезов после их лечения



Первое применение Dentin Desensitizer и его исчезновение после фазы высушивания воздухом



Второе применение Dentin Desensitizer

Клинические результаты показали, что существует разница в чувствительности зубов, обработанных гелем, и зубов в контрольной группе